

**2025年 2月改訂（第4版）

*2024年 1月改訂（第3版）

届出番号：17B2X10001000686

機械器具（66）歯科用練成器

一般医療機器 歯科用練成器具 JMDNコード：70682000

MDSY セメントスパチュラ

**【形状、構造及び原理等】

1) 外観



2) 原材料

ステンレススチール

3) 包装

1本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、セメントを練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。）
- 2) 先端でセメントを練和又は混和する。

*【使用上の注意】

- 1) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Medesy s. r. l.（メデシー社）

製造国：イタリア