

**2024 年 1 月改訂（第 5 版）

*2021 年 9 月改訂（第 4 版）

届出番号：17B2X10001000700

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000

CAD・CAMワックスディスク

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



融点：106℃

厚み	直径
14mm	98.5mm
18mm	
20mm	
26mm	
30mm	

2. 原材料

パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
色素、他

3. 包装

各 1 個 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は歯科用 CAD・CAM 機専用用いるワックスで固定式
補綴修復物のろう型作製用に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品をミリングマシンにセットする。
- 2) ミリングマシンにて本品を削り出し、クラウン・ブリッジ
等の鋳型用ろう型を製作する。(操作はミリングマシンのマ
ニュアルに準ずる)
- 3) 製作したろう型を歯科用埋没材（クリストバライト系、りん
酸塩系）で埋没し、リングファーンズで焼却処理を行う。

【使用上の注意】

- 1) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注
意すること。
- 2) クリストバライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高い
ものを使用すること。(またパターン同士の間隔は十分に取る
こと)

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管す
ること。
- 2) 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場
所、車両内など）に放置しないこと。
- 3) 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保
管しないこと。
- 4) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Shandong Huge Dental Material Corporation

(シャンドン ヒュージ マテリアル コーポレーション)

製造国：中華人民共和国