

シングルエンドエクスプローラーAA

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



タイプ
3
9
25

2. 原材料
ステンレススチール

3. 包装
1 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯科診療で触診等に用いる手持型の器具（プローブ）をいう。
軸の先端の細い作業部分は用途に応じて針状又は鉤型のもの、
又は鈍的形状のものがある。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オート
クレーブ滅菌可。135℃以下厳守）
- 2) 本品の先端部を使って、歯石の探査や修復部の探査を行う。

*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒート
ィングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこ
と。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であ
るが、使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。
- 4) 洗浄・滅菌上の注意

[洗浄]

・ 使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等
で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくく
なる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させる
こと。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがある
ので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キ
ズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要
に応じて潤滑油を塗布すること。）

[滅菌]

・ オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、
乾燥工程も含む 135℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変
形又は変色することがある。

[その他]

・ 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使
用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）こ
とがある。

・ 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保
管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変
色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な乾燥した場所にて保管する
こと。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆び
ている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食
等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止する
こと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam's Aid Corporation
（アダムスエイド社）

製造国：パキスタン