

再使用禁止

NEWミキシングチップ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

***【形状、構造及び原理等】**

1. 形状・構造
下記の通り

| 形状 | カラー | タイプ | 全長 |
|---|------|--------------------|-------|
|  | イエロー | 細 | 70 mm |
|  | ピンク | 中 | 85 mm |
|  | グリーン | 太 | 87 mm |
|  | ブルー | 細細 | 58 mm |
|  | パープル | コアミックス チップロング | 48 mm |
|  | - | コアミックス チップショート | 37 mm |
|  | - | レジンセメント チップショート | 40 mm |
|  | - | レジンセメント チップロング | 50 mm |
|  | イエロー | 細 セーブタイプ | 58 mm |
|  | グリーン | 太 セーブタイプ | 80 mm |

2. 原材料

外側: エチレンプロピレンゴム

内側スクリュー: ポリアセタール樹脂(コアミックスチップ

ロ

ング、コアミックスチップ)、エチレンプロ
ピレンゴム(その他)、着色材

3. 包装

50個 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料(印象材料、セメントなど)を練和又は混和するために用いる。

***【使用方法等】**

【使用方法】

- 1) ディスペンサーガン(別売)にカートリッジ(別売)を取り付ける。
- 2) カートリッジのキャップ(又は使用済みミキシングチップ)を取り外し、2種のペーストが均等に吐出されることを、試し出しをして確認する。
- 3) カートリッジ先端に本品を装着する。(カートリッジとミキシングチップの装着は、使用するカートリッジのミキシングチップ装着方法に準じる。)
- 4) ディスペンサーのレバーを握りペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
- ・ペーストを吐出する時に、過度の圧力をかけないこと。(ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる)
- ・本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 2) 本品に損傷、変形(ひび、割れ、曲がり)等があるものは、使用しないこと。
- 3) 本品を分解、改造などし、歯科練成器以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル

住所: 石川県能美市福島町に152番地

製造業者: SeilGlobal Co., Ltd. (セイルグローバル社)

製造国: 大韓民国