

*2017 年 7 月改訂（第 4 版）

2017 年 7 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000729

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

アルパインブラシ

*【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

形状			
タイプ	ミディアム	ソフト	エクストラソフト
最大回転数	8,000rpm	12,000rpm	12,000rpm
最大径	φ19.0mm		
接続タイプ	HP		

2. 原材料
軸部：真鍮（ニッケル加工）
ブラシ部：ヤギの毛

3. 包装
10 本 / 箱

*【使用目的又は効果】

歯科用電気駆動装置に装着し、補綴物の研磨に用いる。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 歯科用電気駆動装置に本品を装着する。
- 2) 本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
- 3) 振れ等が無ければ、本品を補綴物に軽く押し当て、研磨する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 2) 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、パーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- 4) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 5) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 6) 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- 7) 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
- 8) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。
- 9) 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨剤の種類別に分けて使用すること。

*【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 植毛部（ブラシ部）から絶対に毛を抜いたり、加工したりしないこと。
- 3) ブラシ用洗浄液等に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあるので十分注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Stoddard Manufacturing Company Limited

（ストッダード マニュファクチャリング カンパニー社）

製造国：イギリス