

歯科材料 (09) 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード : 70907000  
**レーズブラシ (Stoddard)**

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り

形状			
植毛 タイプ	4 列・カーブ	3 列・カーブ	3 列・カーブ

形状			
植毛 タイプ	3 列・カーブ	2 列・カーブ	2 列・カーブ

2. 原材料

軸部 : プラスチック  
ブラシ部 : 豚の毛

3. 包装

10 個 / 包

【使用目的又は効果】

歯科技工用レーズに装着し、補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 本品を歯科技工用レーズに装着する。
- 2) 本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
- 3) 補綴物を研磨する。  
※使用回転数 : 2,800rpm 以下厳守

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 指定の回転数を超過して使用しないこと。
- 2) 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- 3) 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 歯科技工用レーズの取扱説明書に従い、ホルダーを確実に装着したことを確認してから使用すること。
- 5) ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりするので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 6) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 7) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 8) 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
- 9) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。
- 10) 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨剤の種類別に分けて使用すること。

\*\*【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 植毛部(ブラシ部)から絶対に毛を抜いたり、加工したりしないこと。

- 3) ブラシ用洗浄液等に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあるので十分注意すること。

- 4) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社歯愛メディカル  
住所 : 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者 : Stoddard Manufacturing Company Limited  
(ストッダード マニュファクチュアリング カンパニー社)  
製造国 : イギリス