

**2024 年 1 月改訂（第 4 版）
*2017 年 7 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001000731

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

綿バフ（S t o d d a r d）

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



直径 100mm、厚さ 10mm

2. 原材料

軸部：革
ブラシ部：キャラコ布

3. 包装

10 個 / 包
1 個 / 包

【使用目的又は効果】

歯科技工用レーズに装着し、補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 本品を歯科技工用レーズに装着する。
- 2) 本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
- 3) 別売の研磨剤などを塗布し、補綴物を研磨する。
※使用回転数：2,800rpm 以下厳守

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- 2) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 歯科技工用レーズの取扱説明書に従い、ホルダーを確実に装着したことを確認してから使用すること。
- 5) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 6) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 7) 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
- 8) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。
- 9) 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨剤の種類別に分けて使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) ブラシ用洗浄液等に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあるので十分に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Stoddard Manufacturing Company Limited
（ストッダード マニュファクチュアリング カンパニー社）
製造国：イギリス