

**2021年 4月改訂（第4版）
*2017年 12月改訂（第3版）

届出番号：17B2X10001000779

歯科材料（03）義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン JMDNコード：70832000

再使用禁止

イージーパンLC

*【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本材またはメタクリル酸モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



2. 原材料
ウレタン・ジメタクリル酸塩、ガラス、
光重合開始剤、着色材等
3. 包装
50枚 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は、個人トレー、ベースプレート等に用いる。

**【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 本品を模型に沿って圧接する。
- 2) 余剰部分を取り除き、辺縁部に圧接する。
- 3) 光照射を5分間行う。
- 4) 模型から本品を取り除き、接着部の照射を5分間行う。
- 5) 必要に応じてトリミング及び研磨を行い仕上げる。

※重合時間は、下記光源を有する歯科技工用重合器を使用する場合を前提とする。

光源	UV-A ライト 波長域：370～380nm
----	---------------------------

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。
- 2) 重合ランプを直視しないこと。
- 3) 重合材料は保存期間ならびに保管条件等により硬化状態が変化することがあるので、適時にサンプル等で硬化を確認し、規定の照射時間で硬化しないものは使用を中止し、廃棄すること。

【使用上の注意】

- 1) 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- 2) 他の製品と混用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 2～27℃の環境で保管すること。
- 2) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限（製造日から2年）までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Vericom Co., Ltd.（ペリコム社）
製造国：大韓民国