

歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN コード：70891000

オーマラブ

【禁忌・禁止】

1. 本材又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は使用しないこと。

※【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造
下記のとおり



M9500



M7500



M1092

2. 仕様

	タイプ	性状	色
ベース	M9500	ペースト	イエロー
	M7500		ブルー
アクティベータージェル（硬化剤）	M1092	ゼラチン状液体	レッド

3. 原材料

ベース（M9500、M7500）：
二酸化ケイ素、石英、シロキサン系ポリマー、着色材、その他
アクティベータージェル（硬化剤）：
二酸化ケイ素、テトラエトキシシラン、その他

4. 包装

タイプ	容量	付属品
M9500	1.6 kg (900ml) × 1	計量スプーン
M7500	1.6 kg (900ml) × 1	
	5kg	
M1092	60ml × 1	—

【使用目的又は効果】

歯科用複模型の作成に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 計量スプーンを用いて必要量のベースを採取する。
- 2) 計量スプーン一杯に対し 1.5cm の割合でアクティベーターを加える。
- 3) 2 材を混合し、ひも状に引き伸ばして、折り束ねる操作を繰り返し、均一になるまで指先で十分に練る。約 40 秒間この練和作業を行う。
- 4) モデルに練和物を盛り、硬化を待つ。

練和時間		最大 40 秒
操作時間		1.5 分
硬化時間		4～5 分
ショア硬度 (A)	M9500	95 (±3)
	M7500	75 (±3)

(室温 23℃)

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 硬化阻害を起こすことがあるので、ゴム製品への接触をしないこと。またゴム手袋を使用したまま、または使用した手で練和しないこと。ゴム手袋を使用した場合は、手を十分洗浄したのち印象材を使用すること。
- 2) シリコン印象材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
- 3) 本材の使用により発疹などの過敏症状の既往歴のある術者は使用しないこと。
- 4) 本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【使用上の注意】

- 1) 使用後は直ちに容器を閉め、蓋、計量スプーンを他のものと混同しないこと。
- 2) 硬化したシリコンは化学的に安定しており、衣服に付着すると除去できないので注意すること。
- 3) 本品と他社製シリコンとを混合して使用しないこと。
- 4) 作業は 18～25℃の室内で行うこと。

【アクティベーターに対する重要な基本的注意】

- 1) 本材の揮発物を吸引しないように注意すること。万一吸引した場合には、新鮮な空気に触れさせ、必要に応じて酸素治療を行う。
- 2) 本材は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄し、速やかに眼科医の診断を受けること。
- 3) 本材に長時間接触しないこと。接触してしまった場合、洗剤及び水で洗浄すること。
- 4) 本材に対して過敏症のある者は、直接触れないようにすること。万一接触して過敏症状が現れた場合、直ちに使用をやめ、皮膚科あるいはアレルギー専門医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本材は、火気厳禁の場所に、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 本材は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【使用期限】

容器に記載されている使用期限（製造日から 3 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

（※例  MM/YY は使用期限 YY 年 MM 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Major Prodotti Dentari S.p.A.

（メジャー プロドッティ デンターリ社）

製造国：イタリア