

歯科材料 (06) 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN コード：70891000

オーマラブ

【禁忌・禁止】

本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 外観等

[ベース]

性状：ペースト状



M7500・M7510



M8501・M8525



M9500

タイプ	色調
M7500・M7510	ブルー
M8501・M8525	グレー
M9500	イエロー

[アクティベーター]

性状：ゼラチン状液体

色調：レッド



M1092

2. 仕様

ショア硬度 (A)	M7500・M7510	75
	M8501・M8525	85
	M9500	95

3. 原材料

ベース：二酸化ケイ素、石英、他

アクティベータージェル（硬化剤）：二酸化ケイ素、テトラエトキシシラン、他

【使用目的又は効果】

歯科用複模型の作成に用いる。

**【使用方法等】

[使用方法]

- 計量スプーンを用いてすり切り一杯ずつ必要量のベースを採取する。
- 計量スプーン一杯に対し 0.5g のアクティベーターを加える。
- 2 材を混合し、ひも状に引き伸ばして、折り束ねる操作を繰り返し、均一な色になるまで指先で十分に練る。
- モデルに練和物を盛り硬化を待つ。

練和時間	最大 40 秒
操作時間	1.5 分
硬化時間	4～5 分

（室温 23℃、湿度 50%）

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 硬化阻害を起こすことがあるので、ゴム製品への接触をしないこと。またゴム手袋を使用したまま、または使用した手で練和しないこと。ゴム手袋を使用した場合は、手を十分洗浄したのち印象材を使用すること。
- 本品と他社製シリコンとを混合して使用しないこと。

【使用上の注意】

- 本品の使用により、発疹等の過敏反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 使用後は直ちに容器を閉め、蓋、計量スプーンを他のものと混同しないこと。
- 硬化したシリコンは化学的に安定しており、衣服に付着すると除去できないので注意すること。
- 本品又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 作業は 18～25℃の室内で行うこと。
- アクティベーターの揮発物を吸引しないように注意すること。万一吸引した場合には、新鮮な空気に触れさせ、必要に応じて酸素治療を行う。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 高温多湿を避け、直射日光が当たらない 10～30℃の場所で保管すること。
- 火気厳禁の場所に保管すること。
- 本品は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[使用期限]

容器に記載されている使用期限（製造日から 3 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Major Prodotti Dentari S.p.A.

（メジャー プロドットィ デンタリー社）

製造国：イタリア