

機械器具 (66) 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード：70682000

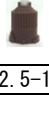
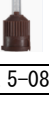
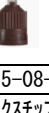
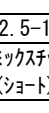
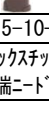
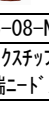
再使用禁止

M i x P a c ミキシングチップ

****【禁忌・禁止】**
再使用禁止

****【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造

形状			
製品名	MBT4. 2-12-D	MBT5. 4-12-D	MBT6. 5-12-D
タイプ	1:1 (ショート)		
	イエロー(細)	ピンク(中)	グリーン(太)
形状			
製品名	MBT3. 2-12-D	MBT3. 2-12-S	MB3. 2-12-D
タイプ	1:1 (ショート)		1:1 (レギュラー)
	ブルー(細ショート)	ブルー(細スリム)	ブルー(細細)
形状			
製品名	MB3. 2-16-S	MB4. 2-12-D	MB5. 4-12-D
タイプ	1:1 (レギュラー)		
	ブルー(細スリム)	イエロー(細)	ピンク(中)
形状			
製品名	MB6. 5-11-D	MB7. 5-11-D	MB4. 2-12-N14
タイプ	1:1 (レギュラー)		
	グリーン(太)	ハーフブルー(太太)	イエロー(先端ニードル)
形状			
製品名	MB3. 2-12-N09	MB3. 2-12-N11	MBTX 3. 2-16-S
タイプ	1:1 (レギュラー)		10:1 (ショート)
	ブルー(先端ニードル)		ブルー
形状			
製品名	MLT2. 5-10-S	ML2. 5-08-S	ML2. 5-08-D
タイプ	レジンセメントチップ	レジンセメントチップ	コアミックスチップ (レギュラー)
形状			
製品名	MLT2. 5-10-D	MLT2. 5-10-N14	ML2. 5-08-N14
タイプ	コアミックスチップ (ショート)	コアミックスチップ (先端ニードル)	コアミックスチップ (先端ニードル)

形状	
タイプ	オールチップ

2. 原材料

ポリプロピレン、ポリアセタール、その他

3. 包装

各 50 個 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

- 1) ディスペンサーガン（別売）にカートリッジ（別売）を取り付ける。
- 2) 試し出しをする場合は 2 種のペーストが均等に吐出されることを確認する。
- 3) 本品の固定用キャップの突起部をカートリッジ先端の溝部に合わせて挿入し、奥まで押し込む。時計回りに回転させて確実に装着する。
- 4) ディスペンサーのハンドルを数回操作して、ペーストを押し出す。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・使用前に本品がカートリッジ又はシリンジに確実に装着されていることを確認すること。
- ・本品を交換する際は、固定用キャップ部の突起部とカートリッジ又はシリンジの溝部を合わせ、根元を持って下方向に折るようにして取り外すこと。
- ・ペーストの押し出し中に抵抗が感じられた場合は、無理にペーストを押し出さずに、本品の交換を行うこと。
- ・本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 歯科の従事者以外は使用しないこと。
- 2) 本品の使用はディスポーザルとし、再使用を禁止する。
- 3) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 4) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
- 5) 本品を分解、改造などし、歯科練成器以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 使用後は地方自治体の法則に則り適切な処分を行うこと。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：medmix Switzerland AG
(メドミックス スウィツァーランド社)
製造国：スイス