

\*\*2022年 11月 改訂 (第5版)  
\*2019年 5月 改訂 (第4版)

届出番号：17B2X10001000812


機械器具 (65) 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 JMDNコード：35794000

## エバンスナイフ AA

### 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記のとおり

1) エバンス

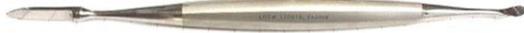

2) レグロン



2. 原材料

作業部：ステンレススチール

ハンドル部：ステンレススチール又はアルミニウム

3. 包装

1本 / 包

### 【使用目的又は効果】

本品はワックスパターンを彫刻するために用いる。

### \*\*【使用方法等】

本品先端部で、ワックスパターンの彫刻及び形成を行う。

### \*\*【使用上の注意】

1. 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃を行うこと。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 器具の形状変更や改造などはしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。汚れをそのまま放置すると除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。  
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。  
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと  
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
3. 洗浄にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam's Aid Corporation（アダムスエイド社）

製造国：パキスタン