

**2024 年 6 月改訂（第 7 版）

*2024 年 1 月改訂（第 6 版）

届出番号：17B2X10001000812

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 JMDN コード：35794000


エバンスナイフ AA

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記のとおり

1) エバンス

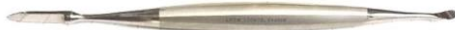

2) レグロン



2. 原材料

作業部：ステンレススチール

ハンドル部：ステンレススチール又はアルミニウム

3. 包装

1 本 / 包

[滅菌]

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、134℃以下】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

・洗浄にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Adam's Aid Corporation（アダムスエイド社）

製造国：パキスタン

【使用目的又は効果】

本品はワックスパターンを彫刻するために用いる。

**【使用方法等】

- 使用前に滅菌済みであるかどうか確認する。（オートクレーブ滅菌可。134℃以下）
- 本品先端部で、ワックスパターンの彫刻及び形成を行う

【使用上の注意】

- 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形状変更や改造などはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

[洗浄]

・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。汚れをそのまま放置すると除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。