

エキスカベーター シリコンハンドル

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形状・構造〕

下記の通り



作業部先端幅 (mm)
1.0
1.5
2.0

〔包装〕

各1本／包

〔原材料〕

シリコン、ステンレスチール

【使用目的又は効果】

本品はカーブのついた切刃をもつ手持型歯科用器具で、蝕歯の齶蝕象牙質の切断及び除去のために用いる。

【使用方法】

- (1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 121℃以下厳守)
- (2) 齶蝕象牙質の切削及び除去を行う。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず適切な洗浄を行い、その後オートクレーブ等で滅菌を行うこと。(乾燥工程を含む 121℃以下厳守)
- (2) 素材のステンレスチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- (3) 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- (4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
 - ・使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。

- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
- ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 121℃以下厳守】
- ・水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- (3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800