

\*\*2024年 1月改訂（第5版）

\*2021年 10月改訂（第4版）

届出番号：17B2X10001000841

医療用品（04）整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDNコード：70975000

再使用禁止

リッチモンドコットンロール 滅菌済

**【禁忌・禁止】**

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと。

**\*【形状、構造及び原理等】**

1. 形状・構造

外観写真は以下のとおり



2. 原材料

綿

3. 包装

2000本 / 箱

**【使用目的又は効果】**

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維からなる材料。

**【使用方法等】**

本品を無菌的に無菌袋より取り出し、そのまま直ちに1回限り使用する。

**\*【使用上の注意】**

- 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。
- 劣化や異常がみられる場合は使用しないこと。
- 繊維が患部に残らないように注意すること。
- 開封後は滅菌状態が保てないので、全量を消費すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。

[有効期間]

包装材に記載の使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：RICHMOND DENTAL（リッチモンドデンタル社）

製造国：アメリカ合衆国