

インプラントクリーナー

【禁忌・禁止】

1. 歯科用インプラント以外に使用しないこと。
2. 使用前には必ず滅菌すること。
3. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避け室温で保存すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・作業部にキズや欠けがないか使用前に目視確認すること。
- ・本品を回転させて、シャンクに曲りがいないことを目視確認すること。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕
下記の通り



フラワー



ポイント

タイプ	全長 (mm)	ワイヤー直径 (mm)
フラワー	37.5 (±1)	0.09
ポイント	35.0	0.09

<CA用>

〔包装〕

- ・フラワー 4 本 / 箱
- ・ポイント 4 本 / 箱

【使用目的又は効果】

本品はインプラントフィクスチャー及び補綴物の清掃・研磨を目的とする。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 121℃以下厳守)
- 2) 本品を減速コントラハンドピースに装着し、インプラント表面の研磨、清掃を行う。
※推奨回転数：300～500 rpm
最大回転数：1200 rpm

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・本品を使用する際は必ず注水しながら使用すること。
- ・使用に関しては無理な力を加えないこと。
- ・最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に装着したことを確認してから使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動したりするような場合、または明らかに破損が確認された場合は直ちに作業を停止すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品は記載の目的のみに使用すること。
- 2) 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 121℃以下厳守)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：HANS KOREA Co., Ltd. (ハンスコリア社)

製造国：大韓民国