

**2024 年 1 月改訂（第 5 版）

*2018 年 5 月改訂（第 4 版）

届出番号：17B2X10001000853

歯科材料（09）歯科用研磨材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード：16184000

再使用禁止

リセラプロフィーカップ

**【禁忌・禁止】

1. ニッケルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【使用上の注意】

- 1) ニッケルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 3) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



スクリュータイプ

CA タイプ
(レギュラー・ソフト・スーパーソフト)

2. 原材料

カップ部：熱可塑性エラストマー、着色剤
軸部：真鍮（ニッケルコーティング）

3. 包装

100 個 / 箱

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

【使用目的又は効果】

本品は歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用電気駆動装置に取り付け回転させて歯面研磨を行う。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 3) 本品に研磨ペーストをカップに適量塗布し、歯面研磨を行う。
- 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。

※最大回転数 10,000 rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- ・指定の回転数を超えて使用しないこと。
- ・使用に関しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- ・使用に関しては、プロフィーカップを歯面にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- ・目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- ・スクリュータイプはモーターを逆（左）回転させると外れてしまうので、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。
- ・シャンク部（軸部）を確実に最後まで挿入し、半チャックになっていないことを確認すること。