


タングプロテクター

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕
下記の通り

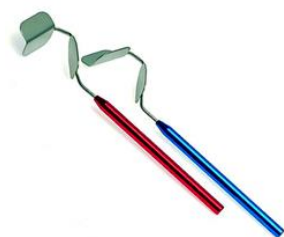

〔包装〕
2 本 / 包

〔原材料〕
作業部：ステンレススチール
柄部：ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

本品は舌を移動させて、口腔内及び歯周組織の検査を容易にするために用いる。

【使用方法等】

- (1) 使用前に必ず滅菌済みかどうかを確認する。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 121℃以下厳守。)
- (2) 本品を患者の口腔内に挿入する。
- (3) 舌を押さえ移動させて口腔内及び歯周組織を観察する。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。
- (2) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- (3) 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- (4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
 - ・使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、唾液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
 - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
 - ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
 - ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度：乾燥工程を含む 121℃以下厳守】
 - ・洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥する。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- (3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に関わる事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないかどうか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：NICHROMINOX S. A. S.（ニクロミノックス社）
製造国：フランス