

**2024 年 1 月改訂（第 3 版）
*2017 年 11 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001000894

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000

ワックスディスク V

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
融点：102～112℃



厚み	直径
14mm	98mm
16mm	
18mm	
20mm	
22mm	
25mm	

2. 原材料
ポリエチレンワックス(合成ワックス)
3. 包装
1 個 / 包

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴物修復物のろう型作製の
キャスティングワックスをいう。

【使用方法等】

- 1) 本品をミリングマシンにセットする。
2) ミリングマシンにて本品を削り出し、クラウン・ブリッジ
等の鋳型用ろう型を製作する。(操作はミリングマシンのマ
ニュアルに準ずる)
3) 製作したろう型を歯科用埋没材（クリストバライト系、りん
酸塩系）で埋没し、リングファーンネスで焼却処理を行う。

* 【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこ
と。
2) 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注
意すること。
3) クリストバライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高い
ものを使用すること。(またパターン同士の間隔は十分に取る
こと)

* 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 15℃～25℃の環境で保管すること。
2) 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場
所、車両内など）に放置しないこと。
3) 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保
管しないこと。
4) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Vericom Co.,Ltd.（ベリコム社）
製造国：大韓民国