

## サーモフィックス

### \*\*【禁忌・禁止】

1. 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は、直接本品に触れないようにすること。

### \*\*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



200 g

1kg

2. 原材料  
ポリエステルホモポリマー
3. 包装  
・ 200g/個  
・ 1kg/個

### 【使用目的又は効果】

本品は、個人トレー、ベースプレート等に用いる。

### \*\*【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 本品を必要量を計量(フルデンチャー1個の場合、必要量 8g)し、カップに入れ、60℃のお湯に入れる。
- 2) 1分後、透明になってきたらインスツルメントで取り出す。
- 3) 石こうに圧接し5分間寝かせる。又は冷水でただちに固める。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 本品は乾いた石こうに圧接すること。

### \*【使用上の注意】

- 1) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は、直接本品に触れないようにすること。
- 3) 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- 4) 他の製品と混用しないこと。

### \*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 直射日光の当たらないところや水のかからないところに保存すること。
- 2) 使用後は地方自治体の法則に則り適切な処分を行うこと。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

[使用期限]

容器に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

( MM DD 20YY は、使用期限 20YY 年 MM 月 DD 日を示す。)

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 歯愛メディカル

住所 : 石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号 : 076-278-8800

製造業者 : PERFLEX LTD (パーフレックス社)

製造国 : イスラエル