

\*\*2023年 2月改訂 (第3版)  
\*2017年 11月改訂 (第2版)

届出番号 : 17B2X10001000941

歯科材料 (09) 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯面研磨材 JMDNコード : 70904000

## プロフィラキス ペースト

### \*【禁忌・禁止】

- 本品に含まれる成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 歯愛メディカル  
住所 : 石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号 : 076-278-8800

製造業者 : Prima Dental Manufacturing Ltd  
(プリマデンタル マニュファクチャリング社)  
製造国 : イギリス

### \*【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造  
性状 : ペースト状  
フレーバー : ペパーミント  
粒子 (RDA) : 50-99
- 原材料  
軽石、炭酸カルシウム、グリセリン、純水、他
- 包装  
200g / 個

### 【使用目的又は効果】

歯面の研磨、清掃をするために用いる。

### \*【使用方法等】

[使用方法]

- ブラシ又はカップ(別売)を歯科用電気駆動装置に装着する。
- 本品をブラシまたはカップに適量採り(またはペーパーパッドに取り出してから採得し)、歯面研磨を行う。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 高速回転で使用するとペーストが飛び散る恐れがあるので、低速回転で使用すること。
- ペーストは乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後は速やかに水で洗浄すること。

### \*【使用上の注意】

- 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本品を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。
- 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

[使用期限]

容器に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)