

**2025 年 7 月改訂（第 5 版）

*2024 年 1 月改訂（第 4 版）

届出番号：17B2X10001000941

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN コード：70904000

プロフィラキシス ペースト

【禁忌・禁止】

- 本品に含まれる成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

性状：ペースト状
フレーバー：ペパーミント
粒子（RDA）：50-99

2. 原材料

軽石、炭酸カルシウム、グリセリン、純水、他

3. 包装

200g / 個

【使用目的又は効果】

歯面の研磨、清掃をするために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- ブラシ又はカップ（別売）を歯科用電気駆動装置に装着する。
- 本品をブラシまたはカップに適量採り（またはペーパーパッドに取り出してから採得し）、歯面研磨を行う。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 高速回転で使用するとペーストが飛び散る恐れがあるので、低速回転で使用する。
- ペーストは乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後は速やかに水で洗浄すること。

【使用上の注意】

- 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本品を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。
- 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Prima Healthcare Group Limited

（プリマヘルスケア グループ社）

製造国：イギリス