

添付文書

2020 年 3 月作成（第 1 版）

届出番号：17B2X10001000947

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000

ワックスディスク ハード&デンチャー

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



厚み	直径
14mm	98mm
16mm	
20mm	
25mm	

融点：103℃

2. 原材料

パラフィンワックス

3. 包装

各 1 個 / 箱

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作成に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品をコンピュータ支援設計・製造ユニット（以降、CAM 機という）にセットし、切削加工を行う。
- 2) 操作は CAM 機の取扱説明書に従う。
- 3) 通法に従い、ワックスパターンの埋没、焼成、鑄造を行う。

【使用上の注意】

- 1) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 3) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 4) 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 5) クリストバライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高いものを使用すること。（またパターン同士の間隔は十分に取る）

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800