

\*2024年1月改訂（第2版）  
2020年3月作成（第1版）

届出番号：17B2X10001000947

歯科材料（07）歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス JMDNコード：16189000

## ワックスディスク ハード&デンチャー

### 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



厚み	直径
14mm	98mm
16mm	
20mm	
25mm	

融点：103℃

2. 原材料  
パラフィンワックス

3. 包装  
各1個 / 箱

### 【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作成に用いる。

### 【使用方法等】

- 本品をコンピュータ支援設計・製造ユニット（以降、CAM機という）にセットし、切削加工を行う。
- 操作はCAM機の取扱説明書に従う。
- 通法に従い、ワックスパターンの埋没、焼成、鑄造を行う。

### 【使用上の注意】

- 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- クリストパライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高いものを使用すること。（またパターン同士の間隔は十分に取ること）

### 【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地