

機械器具（62）歯科用切削器
一般医療機器 歯科用エキスカベータ JMDN コード：35811000

Stellar エキスカベータ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 包装

1 本／包

3. 原材料

作業部：ステンレススチール
ハンドル部：プラスチック

【使用目的又は効果】

本品はカーブのついた切刃をもつ手持型歯科用器具で、蝕歯の齦蝕象牙質の切断及び除去のために用いる。

【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済みか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 121℃以下厳守）
- 齦蝕象牙質の切削及び除去を行う。

**【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄、滅菌を行うこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属だが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 器具に対して形状変更、打刻（刻印）等の二次加工やヒートリングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について
[洗浄]
使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるため使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のため直ちに乾燥すること。

[滅菌]

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程含む 121℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- 洗浄・滅菌はできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：OSUNG MND CO., LTD.（オソン エムエヌディー社）
製造国：大韓民国