

再使用禁止


Ci インジェクションパッド

【禁忌・禁止】

再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造
下記の通り

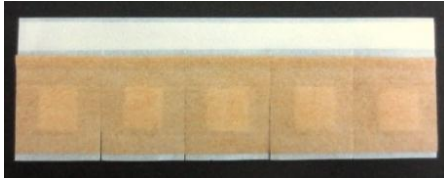

サイズ（1 枚）：粘着テープ部 20×23mm、パッド部 10×10mm

2. 原材料

粘着テープ部：ポリエステル不織布
ゴム系粘着剤（ラテックスフリー）
パッド部：ポリエステル不織布

3. 包装

500 枚/箱 （25 枚/袋×20）

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 袋を開封し、本品を取り出す。
- 2) 台紙裏面上部の剥離紙を剥がし、作業台の端等に固定する。
- 3) 折り返し部をつまみ、台紙から粘着テープを剥がす。
- 4) 傷口とそのまわりを清潔にし、粘着面があたらないよう注意しながら穿刺部にパッドをあて、粘着テープを押さえてしっかり固定するように貼付する。

【使用上の注意】

- 1) 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。
- 2) 袋の開封後は、滅菌状態が保てないので、一度に全量を消費すること。残った未使用の本品を再滅菌して使用しないこと。
- 3) 粘着製品により皮膚の異常を起こしやすい方は、使用前に医師に相談すること。
- 4) 皮膚に異常が現れたり、傷口の治癒や改善が見られない、または悪化した場合は、使用を中止して医師、薬剤師に相談すること。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
2. 小児の手のとどかないところに保管すること。

〔使用期限〕

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。

（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

（例 20YY. MM は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：WAYSON Medical Co., Ltd.

（ウェイソン メディカル社）

製造国：中華人民共和国