

機械器具（36）医療用ピンセット

一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDN コード：31814000

再使用禁止

検診用ピンセット

*【禁忌・禁止】

再使用禁止。


【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

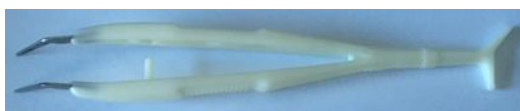

2. 原材料

ハンドル：ABS 樹脂

作業部：ステンレススチール

3. 包装

10 本／パック

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

【使用目的又は効果】

口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持するために用いる。

【使用方法等】

ハンドル部を開閉し、組織等を把持する。

*【使用上の注意】

- 1) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 2) 形態変更や改造等はないこと。
- 3) 本品は滅菌済であるため、再滅菌しないこと。
- 4) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱はしないこと。
- 6) 溶解や破折の原因となるので、器具をヒートリングしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 高温多湿を避け、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

[有効期間]

包装材に記載の使用期限までに使用すること[自己認証（製造所データ）による]