

再使用禁止

検診用基本セット

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 本来の目的以外には使用しないこと。
3. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



	構成品	寸法 (mm)
1	検診用ミラー	全長:170 ミラー内径:21.5
2	検診用ピンセット	全長:165
3	検診用エキスポローラー	全長:165
4	プラトレー	W195×D125×H24

2. 原材料

- (1) 検診用ミラー
本体: ABS樹脂
鏡部: ポリカーボネート
- (2) 検診用ピンセット
ハンドル: ABS樹脂
作業部: ステンレススチール
- (3) 検診用エキスポローラー
ハンドル: ABS樹脂
作業部: ステンレススチール
- (4) プラトレー
ポリプロピレン

3. 包装

検診用ミラー1本、検診用ピンセット1本、
検診用エキスポローラー1本、プラトレー1枚/パック

【使用目的又は効果】

口腔内の診察及び触診を行うために用いる。

【使用方法等】

ハンドル部を持ち口腔内の診察及び触診を行う。

【使用上の注意】

- (1) 本来の目的以外には使用しないこと。
- (2) 本品の使用はディスポーザブルとし、再使用を禁止する。
- (3) 本品は滅菌済であるため、再滅菌しないこと。
- (4) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- (5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱はしないこと。
- (6) 溶解や破折の原因となるので、器具をヒーティングしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- (1) 高温多湿を避け、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
- (2) 保管中、損傷しないように注意すること。

[有効期間]

包装材に記載の使用期限までに使用すること[自己認証(製造所データ)による]。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号: 076-278-8800