

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDN コード：37434000

再使用禁止

C i サリバエジェクター

**【禁忌・禁止】

再使用禁止

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 原材料

チップ：ポリ塩化ビニル
チューブ：ポリ塩化ビニル
チューブ内部：銅メッキを施した鉄線
又はステンレススチール

3. 包装

100 本 / パック (①～④)
95 本 / パック (④)

【使用目的又は効果】

本品は非能動型の吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる管状の単回使用の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

【使用方法等】

使用目的に応じて角度を変え、非能動型の吸引装置にしっかり接続して吸引を行う。

**【使用上の注意】

- 1) 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- 2) 本品に損傷、変形(ひび、割れ、さび)等があるものは使用しないこと。
- 3) 小児または嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるので使用する際は十分に注意すること。
- 4) 保管期間が長くなる場合、空気中の水分と反応し、さびが出る場合があるので、使用前に確認すること。
- 5) 器具の形態変更や改造はしないこと。
- 6) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 2) 開封後は湿気に注意して出来る限り早期に使い切るようにすること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。