

**2024 年 1 月改訂（第 3 版）

* 2016 年 6 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001000991

機械器具（39）医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 JMDN コード：10861001

MDSY リムーブフォーセップ

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

1. 構成



全長：135mm

2. 原材料

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守）
- 2) ハンドル部を開閉し、破折リーマやペーパーポイントなどを把持する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。（乾燥工程を含む、134℃以下厳守）
- 2) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 3) 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- 4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
 - ・使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
 - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
 - ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
 - ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度、乾燥工程を含む 134℃以下厳守】。

・水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Medesy s.r.l.（メデシィ社）

製造国：イタリア