


機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

スーパーライトタフミラー

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

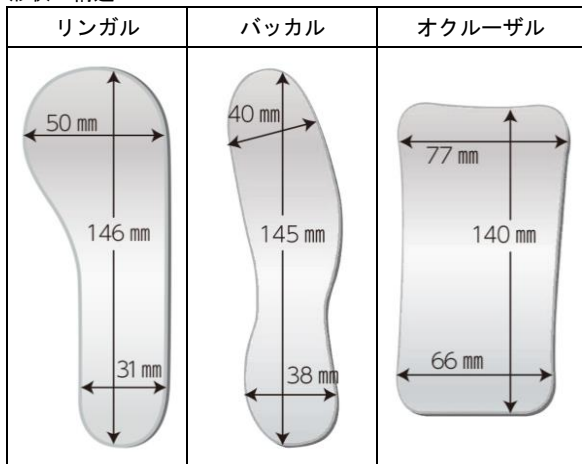

2. 原材料 ガラス

3. 包装 1 枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に滅菌済みかどうか確認する。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。)
- 2) 撮影部位により適切な鏡を選択する。
- 3) 口腔内の歯牙等を鏡の部分に反射させ、撮影する。

*【使用上の注意】

- 1) 素材のガラスは、過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折することがあるので、取り扱いには注意すること。
- 2) 器具の形態変更や改造などはしないこと。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 2) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 3) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 4) 保管中、損傷しないように注意すること。

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 洗浄・消毒・滅菌について

[洗浄]

- ・使用後は洗浄液又は精製水を用いて、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
- ・超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるため使用しないこと。
- ・腐食及び錆びの原因となるので、洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。
- ・超音波洗浄不可。

[消毒]

- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。浸漬は避けること。

[滅菌]

- ・加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。(オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下。)

[その他]

- ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- ・水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：D-Dental Co., Ltd. (ディーデンタル社)

製造国：大韓民国