

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード：34655000

再使用禁止

不織布ガーゼ（滅菌済）

【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]



【保管方法及び有効期間等】

- 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
- 小児の手のとどかないところに保管すること。
- 使用期限：包装材に記載する[自己認証（製造所データ）による]
（※例：🕒 20YY-XX は、使用期限 20YY 年 XX 月を示す）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：湖北福好医療用品有限公司
（コホクフッコウイリョウヨウヒンユウゲンコウシ）
製造国：中華人民共和国

タイプ	層	サイズ
個包装	4 層	50 mm×50 mm
紙パック包装	4 層	50 mm×50 mm

[原材料]

レーヨン、ポリエステル

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

本品を無菌袋より取り出し、そのまま直ちに 1 回限り使用する。

【使用上の注意】

- 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。
- 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
- 小児の手のとどかないところに保管すること。