

再使用禁止（ディスポーザブルカバー）

E Z ショット HD

【禁忌・禁止】

1. ディスポーザブルカバーは、再使用禁止。
2. 必ず専用のディスポーザブルカバーを取り付けて使用すること。
3. 器具の形態変更や改造はしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造



キャプチャーボタン

ファンクションボタン

2. 本体寸法

約 202 mm × 27 mm × 29 mm

3. 使用環境

OS：Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 対応

CPU：2.0 GHz 以上

RAM：1 GB RAM 以上

USB port：USB 2.0 以上

4. 包装

- ・ 本体

[付属品]

- ・ ディスポーザブルカバー100 枚 × 2
- ・ USB ケーブル
- ・ ホルダー s
- ・ ドングル

【使用目的又は効果】

本品は口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する。

【使用方法等】

- 1) 付属のドングルから、ソフトウェアをパソコンにインストールする。
- 2) インストールが完了すると、「Drs Viewer2」のアイコンがデスクトップ上に現れるので起動させる。
- 3) 本品にディスポーザブルカバーを取り付け、USB ケーブルで本品とパソコン本体を接続する。
- 4) 患者を登録または選択した後、カメラボタンを押す。映像がパソコンの画面に現れたのを確認し、本品を口腔内に挿入する。

※詳細な使用方法については、取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

- ・ ディスポーザブルカバーは、再使用しないこと。
- ・ 本品の LED 照明を患者の目に照射しないこと。また、直視しないこと。
- ・ 本来の使用目的以外には使用しないこと。
- ・ 濡れた状態で使用しないこと。
- ・ オートクレーブ等による滅菌処理をしないこと。
- ・ ディスポーザブルカバーは、地方自治体の法令等に従い適切な処分を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・ 適正な濃度の消毒用エタノールを含ませた不織布等で汚れをふき取り、水のかからない場所で保管すること。
- ・ 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Good Doctors Co., Ltd.（グッドドクターズ社）

製造国：大韓民国