

医療用品（04）整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDNコード：35531000

## 再使用禁止

## Gi サージカルドレープ Ab

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地

### 【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造  
不織布製または不織布にポリエチレンフィルムを貼り合せたドレープで、全体サイズ（60×60cm、90×120cm等）、穴/スリットの形状及びサイズ、粘着テープの有無の組み合わせによる種類がある。
- 原材料  
不織布、ポリエチレン
- 包装  
1枚 / パック

### 【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために用いる、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具である。本品は単回使用である。

### 【使用方法等】

#### [使用方法]

- 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認する。
- 無菌操作で包装から取り出す。
- 粘着テープ付きの場合は台紙をはがし、使用目的の部位・場所に掛けて使用する。

### 【使用上の注意】

- 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 本品はディスポーザブル製品であり、再使用・再滅菌はしないこと。
- 滅菌包装は使用直前に開封すること。また開封後は直ちに使用すること。
- 高温を発生する機器類に接しないように注意すること。
- 粘着テープをはがす際には、皮膚からゆっくりはがすこと。
- 本品の使用により、皮膚に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。
- 使用後は医療用廃棄物として適切に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### [保管方法]

直射日光、水濡れ、高温、多湿の環境を避け、涼しいところで保管すること。

#### [使用期限]

包装に記載の使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証【製造所データ】による。）

（※YYYY-MMはYYYY年MM月を示す）