

*2024 年 1 月改訂（第 2 版）
2016 年 8 月作成（第 1 版）

医療機器製造販売届番号：17B2X10001001026

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

再使用禁止 C i ポリッシングブラシ

- *【禁忌・禁止】**
1. ニッケルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



タイプ	カラー	全長	先端径
カップソフト	クリア	28mm	7.0mm
カップハード	ホワイ		
フラットソフト	クリア	28mm	4.5mm
フラットハード	ホワイ		
ポイントソフト	クリア	30mm	4.5mm
ポイントハード	ホワイ		

2. 原材料

軸部：真鍮（ニッケルコーティング）
ブラシ部：ナイロン

3. 包装

各タイプ 100 本/箱

【使用目的又は効果】

本品は歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用ハンドピースに取り付ける。
- 3) 研磨ペーストを本品のブラシに適量塗布する。
- 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。
※最大回転数：10,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- 2) 最大回転数（10,000rpm）を超えて使用しないこと。
- 3) 使用に関しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）

- 4) 使用に関しては、プロフィーブラシを歯面にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- 5) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- 6) シャンク部（軸部）を確実に最後まで挿入し、半チャックになっていないことを確認すること。

***【使用上の注意】**

- 1) 本品を使用し、発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けさせること。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 3) 形態変更や改造等は行わないこと。
- 4) 本品に適合しない歯科用ハンドピースには使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後に、破損、ヒビ、キズ及び腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地