

機械器具(50) 開創又は開孔用器具

一般医療機器 歯科用開創器 JMDNコード: 13380000

Stellar ジンジバルリトラクター

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記外観写真の通り



型番	全長	先端幅
3GRM1	175mm	5.2mm
3GRM2		5.8mm
3GRM3		7.5mm

(公差: ±5%)

2. 原材料

ハンドル部: プラスチック
先端部: ステンレススチール

3. 包装

1本 / 包

【使用目的又は効果】

歯科治療時に軟組織を移動させる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 121°C以下厳守。)
- 2) ハンドル部をしっかり握り、目的部位の軟組織を移動させる。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず適切な洗浄を行い、その後オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度(乾燥工程を含む) 121°C以下厳守】
- (2) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- (3) 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- (4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
・使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。

- ・洗浄液の残留がないように充分すすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
- ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- ・水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- (3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル

住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号: 076-278-8800

製造業者: OSUNG MND CO., LTD. (オソン エムエヌディー社)

製造国: 大韓民国