

** 2024 年 1 月改訂（第 8 版）
* 2023 年 7 月改訂（第 7 版）

届出番号：17B2X10001001050

歯科材料（08）歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう JMDN コード：70897020

CAD/CAMストーンディスク

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造



形状	製品コード	厚さ	外径
ディスク	SR3DGD20-J (C1)	20	98.5
	SR3DGD25-J (C1)	25	
	SR3DGD30-J (C1)	30	

（単位：mm）

2. 原材料

硫酸カルシウム・二水和物、着色材

3. 包装

20mm：12 枚 / 箱
25mm：10 枚 / 箱
30mm：10 枚 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石こうである。

【使用方法等】

- 使用する CAM システムに適合する本品を選択する。
- CAD/CAM システムを用いて、設計、加工を行う。
- 加工後、本品を取出し、仕上げを行う。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 本品を使用する際は、粉塵を吸引しないように、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 本品を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどの防具を使用すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿の場所を避け、換気の良い場所で保管すること。
- 開封したまま放置すると吸湿し、変質する恐れがある。
- 開封後は十分に密封するか、密封できる容器に移して保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Mungyo Corporation
（ムンギョウ コーポレーション）
製造国：大韓民国