

**2024 年 1 月改訂（第 3 版）

*2017 年 4 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001056

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

正宗ボールバフ

【禁忌・禁止】

1. 注意事項を厳守の上、使用すること。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造等】

1. 形状・構造
下記のとおり



グリーン：粗～中研磨用
ミント：中研磨～中仕上げ用

HP 用（単位：mm）

作 業 部		全 長
最大径	長さ	
26.5	20.0	54.0

2. 原材料

作業部：ナイロン繊維
軸部：ステンレススチール

3. 包装

3 本 / 箱

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

歯科用電気駆動装置に装着し、補綴物等を研磨する。

最大回転数：5,000 rpm

推奨回転数：3,000 rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。

- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
3. 片減りなど生じた時は速やかに修正し、常に芯振れのない状態で使用すること。
4. 研磨時の火花が研磨屑の粉塵に着火し、燃えることが有るので粉塵がダクト等に溜まらないよう、又火花が粉塵の中に入らないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：株式会社ダイテックジャパン大平工場
住所：静岡県沼津市大平 6 6 7 ー 7
電話番号：055-935-1200