

EVE ダイヤセラ

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

HP 用

代表例：ミディアム



タイプ	カラー
ミディアム	グリーン
ファイン	ブラウン

2. 原材料

作業部：ポリウレタン、ダイヤモンド砥粒
シャンク部：ステンレススチール

3. 包装

1 本 又は 10 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は微細なダイヤモンド結晶が砥着されたゴム製歯科用研磨材で、セラミック、メタル等の補綴物の研磨に用いる。

**【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 本品を歯科用電動駆動装置に確実に装着する。
2. 試運転を行い振れがなければ、補綴物等の研磨を行う。
推奨回転数：7,000～12,000rpm
最大回転数：20,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 研磨時の摩擦熱により作業部が劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

**【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：EVE Ernst Vetter GmbH

（イーブ アーンスト ベッター社）

製造国：ドイツ