

メタルポリリッシュパッド

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はいしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記のとおり



No.	用途	サイズ (mm)
300	コバルト研磨用	24×4.5
301		24×10
400	金パラ研磨用	24×4.5
401		24×10

2. 原材料

ナイロン、フェノール樹脂 他

3. 包装

- (1) 20 枚 (No. 300・No. 400)
- (2) 10 枚 (No. 301・No. 401)

【使用目的又は効果】

歯科技工用ハンドピースに装着し、歯科技工物の研磨に用いる。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- (1) 研磨する材料・工程に合った本材を選択する。
- (2) パッドホイール用マンドレール（別売）に本材を装着し、歯科技工用ハンドピースにそのマンドレールを装着する。
試運転し、振れ等がないか確認する。
- (3) 補綴物を研磨する。
※最大回転数：20,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) 接触幅が左右等しく、適切な外径をもつフランジが備わったマンドレールを使用すること。
- (2) 研磨機械の手順に従って操作すること。
- (3) 最大回転数を超えた使用はしないこと。
- (4) 研磨作業中、本材に過度の力を加えないこと。
- (5) ホイールの穴径が適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修は行わないこと。

【使用上の注意】

- (1) 歯科従事者以外は使用しないこと。
- (2) 研磨作業中に本材が外れないように、しっかりと装着すること。
- (3) 使用時には保護眼鏡や防塵マスクを着用すること。
- (4) 本材を表記以外の用途に使用しないこと。
- (5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはいしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〔使用者による保守点検事項〕

使用前使用後は汚れ、傷、曲がりなどがないか点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：DMAX Co., Ltd. (ディーマックス社)

製造国：大韓民国