

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス JMDNコード: 16189000
ワックスディスクDX

【警告】

- ・本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・本来の目的以外には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



厚み	直径
14mm	98mm
16mm	
20mm	
25mm	

融点: 100~106°C

2. 原材料

ポリエチレンワックス 他

3. 包装

各1個 / 箱

【使用目的又は効果】

本材は主にクラウン・ブリッジ等のパターン製作などに用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 本材をミリングマシーンにセットする。
- 2) ミリングマシーンにて本材を削り出し、クラウン・ブリッジ等の鑄型用ろう型を製作する。(操作はミリングマシーンのマニュアルに準ずる)
- 3) 通法に従い、ワックスパターンの埋没、焼成、鑄造を行う。

【使用上の注意】

- 1) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 3) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと
- 4) 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 5) クリストパライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高いものを使用すること。(またパターン同士の間隔は十分に取ること)

***【保管方法及び有効期間等】**

- ・高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル

住所: 石川県能美市福島町に152番地

製造業者: DMAX Co., Ltd. (ディーマックス社)

製造国: 大韓民国