

デンチャーポリッシュパッド

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記のとおり



| No. | 用途 | サイズ(mm) | |
|------|---------|------------|------|
| 500 | レジン粗研磨用 | 24×4.5 | |
| 600 | レジン中研磨用 | 24×4.5 | |
| 803 | レジン光沢用 | 25×5 | |
| H800 | レーズ用 | アクリルレジン研磨用 | 80×7 |
| H801 | | ポリアミド系研磨用 | 80×7 |

2. 原材料

[No. 500・600・H800・H801]

ナイロン、フェノール樹脂 他

[No. 803]

綿

3. 包装

(1) 15枚(No. 500)・1枚(No. 803)

(2) 13枚(No. 600)・1枚(No. 803)

(3) 各1枚(No. H800・No. H801)

【使用目的又は効果】

歯科技工用ハンドピースまたは歯科技工用レーズに装着し、歯科技工物の研磨に用いる。

*【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 研磨する材料・工程に合った本材を選択する。
- (2) パッドホイール用マンドレル(別売)に本材を装着し、歯科技工用ハンドピースに装着する。
H800、H801は、歯科技工用レーズに装着する。
試運転し、振れ等がないか確認する。
- (3) 補綴物を研磨する。
※最大回転数：20,000rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 接触幅が左右等しく、適切な外径をもつフランジが備わったマンドレルを使用すること。
- (2) 研磨機械の手順に従って操作すること。
- (3) 最大回転数を超えた使用はしないこと。
- (4) 研磨作業中、本材に過度の力を加えないこと。
- (5) ホイールの穴径が適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修は行わないこと。

【使用上の注意】

- (1) 歯科従事者以外は使用しないこと。
- (2) 研磨作業中に本材が外れないように、しっかりと装着すること。
- (3) 使用時には保護眼鏡や防塵マスクを着用すること。
- (4) 本材を表記以外の用途に使用しないこと。
- (5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：DMAX Co., Ltd. (ディーマックス社)

製造国：大韓民国