

**2024 年 1 月改訂(第 4 版)
* 2017 年 2 月改訂(第 3 版)

届出番号：17B2X10001001107

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 JMDN コード：70901000

デンチャーポリッシュパッド

【禁忌・禁止】

- 本来の目的以外には使用しないこと。
- 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記のとおり



No.	用途		サイズ(mm)
500	レジン粗研磨用		24×4.5
600	レジン中研磨用		24×4.5
803	レジン光沢用		25×5
H800	レーズ用	アクリルレジン研磨用	80×7
H801		ポリアミド系研磨用	80×7

2. 原材料

[No. 500・600・H800・H801]

ナイロン、フェノール樹脂 他

[No. 803]

綿

3. 包装

- (1) 15 枚 (No. 500) ・ 1 枚 (No. 803)
- (2) 13 枚 (No. 600) ・ 1 枚 (No. 803)
- (3) 各 1 枚 (No. H800 ・ No. H801)

【使用目的又は効果】

歯科技工用ハンドピースまたは歯科技工用レーズに装着し、歯科技工物の研磨に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- (1) 研磨する材料・工程に合った本材を選択する。
- (2) パッドホイール用マンドレル(別売)に本材を装着し、歯科技工用ハンドピースに装着する。
H800、H801 は、歯科技工用レーズに装着する。
試運転し、振れ等がないか確認する。
- (3) 補綴物を研磨する。
※最大回転数：20,000rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- (1) 接触幅が左右等しく、適切な外径をもつフランジが備わったマンドレルを使用すること。
- (2) 研磨機械の手順に従って操作すること。
- (3) 最大回転数を超えた使用はしないこと。
- (4) 研磨作業中、本材に過度の力を加えないこと。
- (5) ホイールの穴径が適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修は行わないこと。

【使用上の注意】

- (1) 歯科従事者以外は使用しないこと。
- (2) 研磨作業中に本材が外れないように、しっかりと装着すること。
- (3) 使用時には保護眼鏡や防塵マスクを着用すること。
- (4) 本材を表記以外の用途に使用しないこと。
- (5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：DMAX Co., Ltd. (ディーマックス社)

製造国：大韓民国