

** 2024 年 1 月改訂(第 3 版)

* 2021 年 12 月改訂(第 2 版)

届出番号 : 17B2X10001001115

歯科材料 (07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード : 16189000

POLY キャスト

* 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



厚み	直径
16mm	98mm
20mm	

融点 : 130~140℃

2. 原材料

PMMA (アクリル樹脂)

3. 包装

1 個 / 箱

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴物修復物のろう型作製に用いる。

* 【使用方法等】

- 1) 本品をミリングマシンにセットする。
- 2) ミリングマシンにて本品を削り出し、クラウン・ブリッジ等の鋳型用の型を製作する。(ミリングマシンの操作に関し柄は、取扱説明書を参照すること。)
- 3) 製作した型を歯科用埋没材 (りん酸塩系) で埋没し、リングファーンネスで焼却処理を行う。

* 【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 本品を高温となる場所 (ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など) に放置しないこと。
- 2) 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- 3) 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

・ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社歯愛メディカル
住所 : 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者 : Harvest Dental Products, LLC
(ハーベストデンタルプロダクツ社)

製造国 : アメリカ合衆国