

歯科材料（07）歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDNコード：70893000

リセラ New パラフィンスモール**【形状、構造及び原理等】**

1. 形状・構造
下記の通り



融点：62°C±3

厚み	サイズ	質量
1.3 mm	145 mm×75 mm	12g/枚

2. 原材料

パラフィンワックス、セレスンワックス、蜜蝋

3. 包装

20枚(240g) / 箱

【使用目的又は効果】

本材は主として義歯床の仮床、人工歯の排列などに用いる。

【使用方法等】**義歯の仮床**

- 1) 本材を作業模型の大きさに合わせてカットする。
- 2) 本材を適度に軟化し、作業模型に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

人工歯の排列

- 1) 本材を適度に軟化し、巻き棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
- 4) 歯科技工の通法に従い、人工歯を排列する。

ロウ堤の作製

- 1) 本材を適度に軟化し、巻き棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【使用上の注意】

- 1) 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 2) 溶解した本材を直接人体に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所、車両内）に放置しないこと。
- 2) 10°C～30°Cの場所で保管すること。
- 3) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 4) 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
- 5) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Dental Materials Factory of SMIC Ltd.
(デンタル マテリアルズ ファクトリー オブ エスエムアイシー社)
製造国：中華人民共和国