

## Biz ラバーダムフレーム $\alpha$

### \*\*【形状、構造及び原理等】

#### 1. 外観



#### 2. 原材料

ステンレススチール

#### 3. 包装

1本 / 包

### 【使用目的又は効果】

ラバーダムシートを本品に装着し、術野を防湿する際に用いる。

### 【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認する。  
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134°C 厳守。)
- フレームの突起部分にラバーダムシートを伸張させながら引っ掛け、フレーム内にダムを形成する。

### \*\*【使用上の注意】

- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- 劣化や異常が見られる場合は、使用を中止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

### \*\*【保守・点検に係る事項】

- 使用前、使用後は、破損、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

#### [洗浄]

・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

#### [滅菌]

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134°C 以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

#### [その他]

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆び)ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル

住所: 石川県能美市福島町に152番地