

\*\*2026年2月改訂（第4版）

\*2024年1月改訂（第3版）

届出番号：17B2X10001001155

歯科材料（09）歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 JMDNコード：70901000

## グラスファイバーセパディスク

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造



#### 2. 原材料

合成樹脂、グラスファイバー

#### 3. 包装

10個 / パック

### 【使用目的又は効果】

本品は技工用研削材のディスクで、歯科用マンドレルを使用し、  
歯科用電気駆動装置に装着して、回転させ、研削・研磨する。

### 【使用方法等】

#### [使用方法]

- 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着する。
- 試運転して回転に振れ等がなければ、歯科用電気駆動装置に  
装着し回転させて、研削、研磨する。  
※最大回転数：25,000 rpm

#### [使用方法等に関連する使用上の注意]

- 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは  
使用しないこと。
- 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、本品を装着したマ  
ンドレルを確実に奥まで装着したことを確認してから使用する  
こと。
- 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、  
破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管す  
ること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食  
がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止するこ  
と。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：acurata GmbH & Co. KGaA  
（アキュラタ ゲーエムベーハー社）  
製造国：ドイツ