

## サーモトレーペレット

### \*【禁忌・禁止】

- 1) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は、直接本品に触れないようにすること。

### \*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



付属品: スプーン

2. 原材料  
ポリ-ε-カプロラクトン
3. 包装  
230g / 個、スプーン1本

### 【使用目的又は効果】

本品は、個人トレー、ベースプレート等に用いる。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- 1) 本品を必要量測定(全額用個人トレー1個作成の場合、付属スプーン約5杯(15g))し、70-80℃のお湯に入れる。
- 2) 約10秒後、透明になり、柔らかくなってきたらインスツルメントで取り出す。
- 3) トレーや石こうに圧接し、約3分間寝かせる。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本品は乾いた石こうに圧接すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は、直接本品に触れないようにすること。
- 3) 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- 4) 他の製品と混用しないこと。


### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

#### 【使用期限】

容器に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

 20YY. MM. DD は、使用期限 20YY 年 MM 月 DD 日を示す)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル

住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号: 076-278-8800