

歯科材料 (03) 義歯床材料

一般医療機器 歯科印象トレー用レジン JMDNコード : 70832000

サーモトレーペレット

*【禁忌・禁止】

- 1) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は、直接本品に触れないようにすること。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



付属品 : スプーン

2. 原材料
ポリ-ε-カプロラクトン
3. 包装
230g / 個、スプーン1本

【使用目的又は効果】

本品は、個人トレー、ベースプレート等に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 本品を必要量測定 (全顎用個人トレー1個作成の場合、付属スプーン約5杯 (15g)) し、70-80°Cのお湯に入れる。
- 2) 約10秒後、透明になり、柔らかくなってきたらインスツルメントで取り出す。
- 3) トレーや石こうに圧接し、約3分間寝かせる。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・本品は乾いた石こうに圧接すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し専門医の診断を受けさせること。
- 2) 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- 4) 他の製品と混用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

[使用期限]

容器に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

(20YY. MM. DD は、使用期限 20YY年 MM月 DD日を示す)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社歯愛メディカル
住所 : 石川県能美市福島町に152番地