

ツインキュア

【禁忌・禁止】

目を損傷させる恐れがあるので、光源を直視しないこと。


*【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造
1) 本体正面



POWER	電源のオン。
TIME	照射時間の選択。 5分、10分、15分、30分、45分、60分
START	照射開始。
STOP	照射停止/照射時間の設定リセット。


- 2) チャンバー内

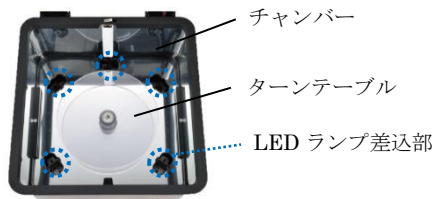

- 3) 本体背面下部



2. 付属品

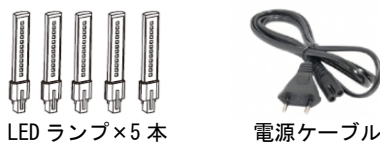

3. 仕様

寸法(L×W×H)：24×24×25cm
重量：2.4kg
ターンテーブル径：φ14cm
電氣的定格：AC100V 50/60Hz
消費電力：70W
波長域：365～405nm
光源：UV LED

4. 包装

1セット / 箱

【使用目的又は効果】

歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる。

*【使用方法等】

【使用前の準備】

- 使用前に取扱説明書をよく読むこと。
- LED ランプを5本すべて「LED ランプ差込部」に差し込む。
- 電源コードを「電源コード接続部」に接続し、プラグ部分をコンセントに挿す。

【使用方法】

- 「POWER」を押し、電源を入れる。
- カバーを開けて造形物をターンテーブルにセットし、カバーを閉める。
- 「TIME」を押し、照射時間を選択する。
- 「START」を押し、照射を開始する。「STOP」を押すと照射が停止する。
- 照射終了後（通知音が鳴り、操作パネルのライトが消える。）に造形物を取り出す。

【使用後】

- コンセントからプラグを抜き、LED ランプを全て取り外す。
- ターンテーブル、チャンバー内を柔らかい布で拭きとる。
- LED ランプを「LED ランプ差込部」に差し込む。

【使用環境条件】

温度：0～40℃
湿度：20～80%（結露しないこと）
気圧：802 hPa 以下

【使用上の注意】

- 本品専用の付属品を使用すること。
- 硬化サイクルを開始する前に、各素材を二次硬化する推奨時間を確認すること。
- 硬化中、または硬化後は高温になるため、火傷に注意すること。
- IPA またはまだ硬化していない液状樹脂が付着している造形物やその表面を触るときは手袋を着用すること。
- 可燃性物質等爆発の危険性のある物質を使用している場所での使用は避けること。
- 製品に過度の力や衝撃を与えないこと。
- ターンテーブルと内側表面を常に清潔に保つこと。
- 形態変更や改造はしないこと

【保管方法及び有効期間等】

- 高温、湿気をさけて保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
- 水のかからない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後は、清潔な布（綿）でチャンバー内、ターンテーブルと製品の表面を清掃すること。
- 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：MEDIFIVE CO., Ltd. (メディファイブ社)
製造国：大韓民国